

NÁVOD K POUŽITÍ SILIKONOVÉ ODSÁVACÍ HADICE

Silikonová odsávací hadice MACLYSA.

Praktické rady pro instalaci a použití.

Opatření:

Obsluha pouze kvalifikovaným personálem. Před použitím produktu pečlivě přečíst návod. Zajistit spojení systému.

Učel

Silikonové hadice MACLYSA jsou navrženy tak, aby vytvořily vakuum mezi odsávacím přístrojem (nebo vakuovým ventilem) a sběrnou nádobou

Popis:

Skládá se z jednoho kusu vyrobeného ze silikonového materiálu, inertního, pružného a elastického. Tvoří ji duté těleso o různých průměrech a různých délkách.

Použití silikonové hadice:

Používejte pouze jako díl mezi odsávacím přístrojem (nebo vakuovým ventilem) a sběrnou nádobou. Hadice jsou určeny k NEINVAZIVNÍMU použití. Hadice nejsou určeny pro vložení do žádného otvoru v těle pacienta.

Hadice nejsou určeny pro průtok a skladování krve, tekutin, tělesných tkání, kapalin nebo plynů pro infuze, podávání nebo zavedení do lidského těla. Trubice NEJSOU určeny k zavádění žádné látky do lidského těla. Zpětný tok hadicemi je nepravděpodobný

Hadice jsou určeny pro jednorázové použití a pro přechodné nebo krátkodobé použití (nepřetržité používání kratší než 30 dní).

Hadice jsou vyráběny, baleny a uváděny na trh NESTERILNÍ.

Pracovní teplota silikonové hadice se pohybuje od -40 °C do 200 °C, s vrcholy 250 °C.

Kontraindikace:

Přecitlivělost na některý ze základních prvků silikonu.

Při jakémkoliv změně vlastností výrobku nebo jeho výkonu je nutné upustit od jeho používání a anomálie musí být okamžitě hlášeny výrobcí.

Upozornění:

Skladovat v běžných podmínkách pro zdravotnický materiál.

Opětne nezpracovávat ani nepoužívat.

Vyhazovat do kontejnerů pro biologický materiál.

Výrobce:

MACLYSA, S.L.

Polígono Industrial Las Viñas

C/Murcia 69

13420 Malagón (Ciudad Real) ŠPANĚLSKO

Tel.: (+34) 926 80 21 78

Fax: (+34) 926 80 16 40

E-mail: info@maclysa-sl.es

